



Gebrauchsanweisung

Konservierungsmittelfreie künstliche Tränen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produkts beginnen.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn die Symptome fortbestehen oder Sie Nebenwirkungen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Was ist Ocutears® Alo+ und wofür wird es verwendet?

Ocutears® Alo+ ist eine befeuchtende Augentropfenlösung, die auf der Basis von quervernetztem Natriumhyaluronat (0,4 %) und Aloe Vera (0,2 %) zur Behandlung von Augenbeschwerden formuliert wurde. Die befeuchtende Augentropfenlösung dient dem Schutz der Hornhaut bei schweren Fällen von durch das Trockene Auge verursachten Augenbeschwerden.

Quervernetztes Natriumhyaluronat verleiht dem Produkt eine hohe Viskoelastizität, die ein hohes Maß an Hydratation und Beständigkeit auf der Augenoberfläche gewährleistet und eine dauerhafte Linderung von Symptomen des Trockenen Auges bietet.

Aloe Vera ist bekannt für seine feuchtigkeitsspendenden, abschwellenden und befeuchtenden Eigenschaften, die der Lösung eine höhere Feuchtigkeitskapazität verleihen und so den Sehkomfort verbessern und das Gefühl der Frische verlängern. Aloe Vera hat sich auch bei Rötungen oder besonders empfindlichen Augen als nützlich erwiesen, da es eine stark feuchtigkeitsspendende und lang anhaltende Schutzwirkung hat.

Ocutears® Alo+ ist indiziert:

- zur Linderung von Symptomen des Trockenen Auges, Reizungen und Rötungen, die durch Umweltbedingungen oder Medikamente verursacht werden
- zur Benetzung des Auges bei Verwendung von Kontaktlinsen

Ocutears® Alo+ ist während und nach der Behandlung hilfreich bei:

- Aufenthalt in klimatisierten Räumen
- Exposition in klimatisierten Räumen
- längerer Bildschirm-Nutzung

Ocutears® Alo+ lindert auch postoperative Beschwerden des Auges.

Verwendung von Ocutears® Alo+:

Geben Sie 1 oder 2 Tropfen in jedes Auge ein- oder mehrmals täglich oder entsprechend der Anweisung Ihres Arztes.

Waschen Sie sich vor dem Öffnen des Behälters die Hände und achten Sie bei der Handhabung auf Hygiene.

Flasche:

- 1) Ziehen Sie vor dem ersten Öffnen die Versiegelung vollständig ab und entfernen Sie sie.
- 2) Geben Sie vorsichtig 1 Tropfen in das Auge.
- 3) Verschließen Sie die Flasche fest nach Gebrauch.



ED:

- 1) Nehmen Sie ein Einzeldosisbehältnis.
- 2) Öffnen Sie das Behältnis durch Drehen des Deckels.
- 3) Drücken Sie vorsichtig 1 Tropfen in das Auge.



Warnungen:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch oder überempfindlich sind.
- Bei schweren Hornhauterkrankungen sollte vor der Anwendung ein Arzt konsultiert werden.
- Verbrauchen Sie die Flasche innerhalb von 90 Tagen nach dem Öffnen; das Einzeldosisbehältnis sollte sofort nach dem Öffnen verwendet und nach Gebrauch entsorgt werden.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Bitte nicht einnehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Spitze des Behältnisses nicht mit dem Auge in Berührung kommt.
- Unter 25° C lagern. Nicht einfrieren.


Zusammensetzung:

Quervernetztes Natriumhyaluronat 0,4 %, Aloe Vera Gel 0,2 %, Dinatriumtetraborat-Decahydrat, Borsäure, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke (WFI).

Darreichungsform:

10 ml Flasche (PFMD), 0,35 ml x 15 ED, 0,35 ml x 5 ED (Muster), 0,35 ml x 2 ED (Muster)

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Arzt oder an eine Niederlassung von Santen in Ihrer Nähe unter www.santen.eu.

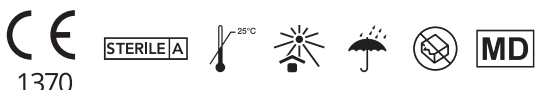

OFFHEALTH S.p.A.,
Via Giovanni Paisiello 10,
50144 Florenz, Italien

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2022 zuletzt überarbeitet.

Vertrieb in Deutschland: Santen GmbH - Erika-Mann-Straße 21, D-80636 München

Herstellungsdatum	Hersteller	Nicht über 25°C lagern	Vor Sonnenlicht schützen	Sterilisiert durch aseptische Herstellung	Chargennummer
Verwendbar bis	Packungsbeilage beachten	Nicht wiederverwendbar	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	Vor Feuchtigkeit schützen	Medizinprodukt